

# SIMtoCARE Simulator 操作指引

## 一、啟動 simulator

1. Simulator 開關位於 iPad 背面，輕輕按壓 iPad 背面的電源開關(輕壓一下就好、再壓就關機了)



2. 啟動後可見 simulator 亮起黃燈、手機位置邊右。啟動校正完成後 simulator 會亮藍燈、手機置於正中央位置，此時 simulator 為可使用狀態



3. 開啟 iPad，輕輕按壓 iPad 上的黑色按鈕


## 二、登入與設定

1. 輸入帳號/密碼，內設登入帳號為 email、密碼為學號。




2. 登入後可見到使用者的所有課程
3. 請點選右上角人像 icon

## SIMtoCARE Simulator 操作指引

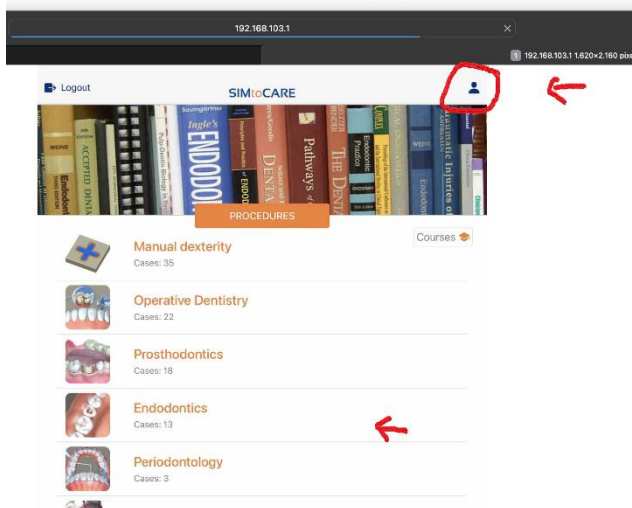


4. 頁面中間為使用者資訊
5. 請點選右上角 setting

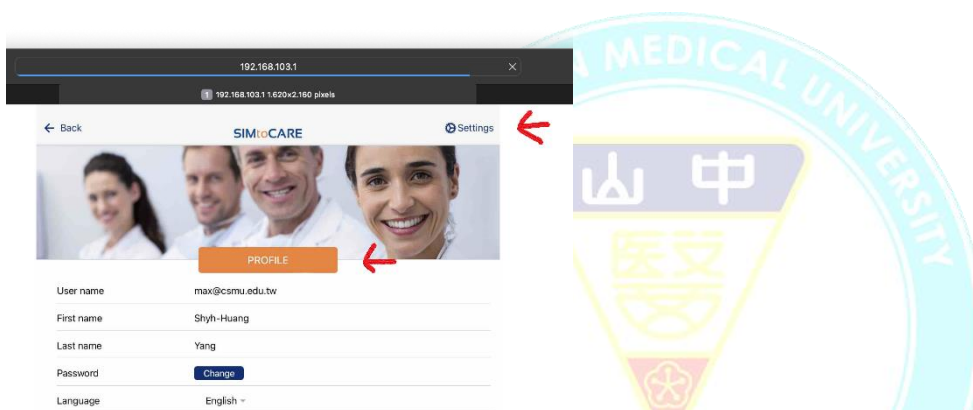

6. Setting:可設定 simulator 各項參數
  - (1) Volume:調整 simulator 音量
  - (2) Set depth:調整景深，值越大越立體但越失真
  - (3) Set height:調整 simulator 高度


simulator 高度以坐姿挺直、下巴接近 simulator 視窗為宜。使用拉把設定高度，然後手一直壓著 simulator 頭部按鈕，或右腳一直踩住踏板左邊按鈕，功能與頭部按鈕相同，simulator 移動到您設定的高度時會自動停止，若中途放開按鈕升降即停。

- (4) Background:調整 simulator 視窗背景明亮度

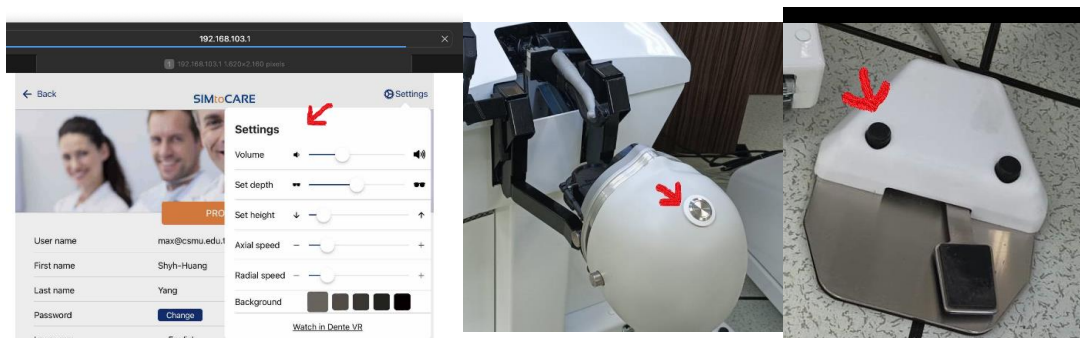

### 三、 調整 model 角度與位置

1. 選擇操作 case 後螢幕出現課程頁面
2. 擬移動或旋轉 model 時，請一手壓住頭部按鈕或右腳踩住踏板左邊按鈕、一手執手機即可上下/左右移動，放開按鈕即停止移動或旋轉
  - (1) 輕壓人頭上的按鈕可見到畫面出現灰白色網格，此為操作空間的中心位置，請將 model 概略放置於此網格中心位置，以免影響操作空間。
  - (2) 放大: loupe 功能，最大 4.5x
  - (3) 齒色: 可調整牙齒顏色
  - (4) Reset: 重新開始
  - (5) 全視窗: 將操作視窗放大為全視窗
  - (6) case 開始時間，進入 case 即開始計時
  - (7) 各項操作狀況指標
  - (8) 手機選項
  - (9) 亮度調整
  - (10) 噴水開關
  - (11) Burs 選項
  - (12) 口徑選項
  - (13) 手機轉速: 請將踏板做右移動即可升降收機轉速

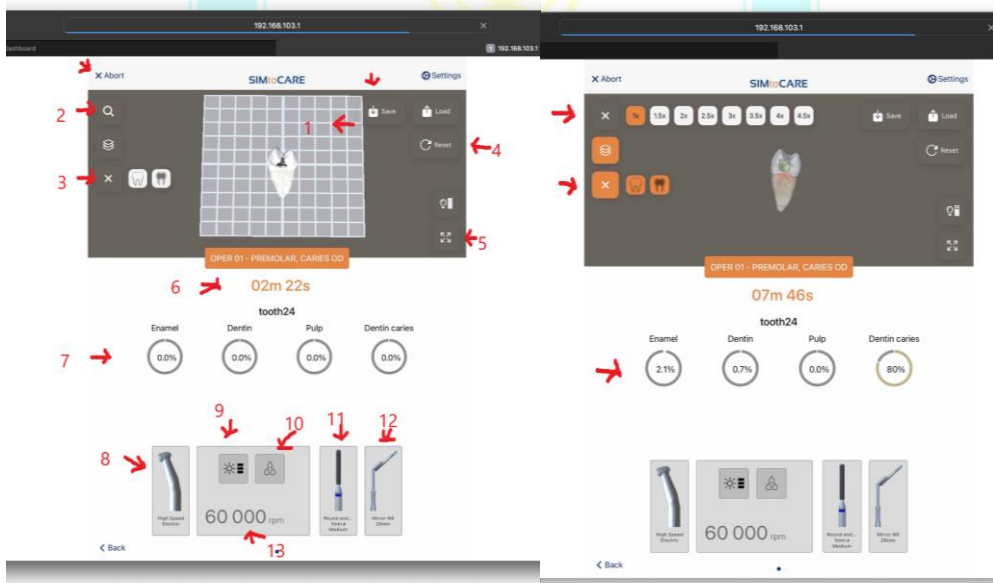


3. 亮度調整: 調整亮度的另一方法，可直接手指輕點操作畫面，畫面會出現亮燈圖示




#### 四、 結束/登出

1. 操作完畢，記得提交您的 case，將 iPad 往左滑動即會出現 submit 畫面，歡迎給予建議與回饋(目前只能輸入英文，待更新後應可輸入中文)

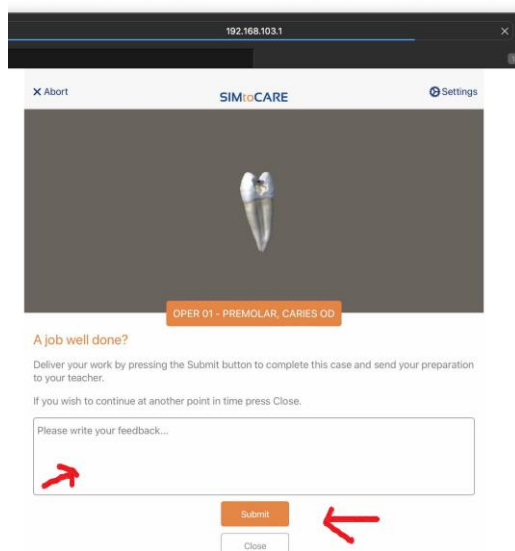

2. 調降 simulator 與座椅至最低:請回到設定高度選項，將 simulator 降至最低

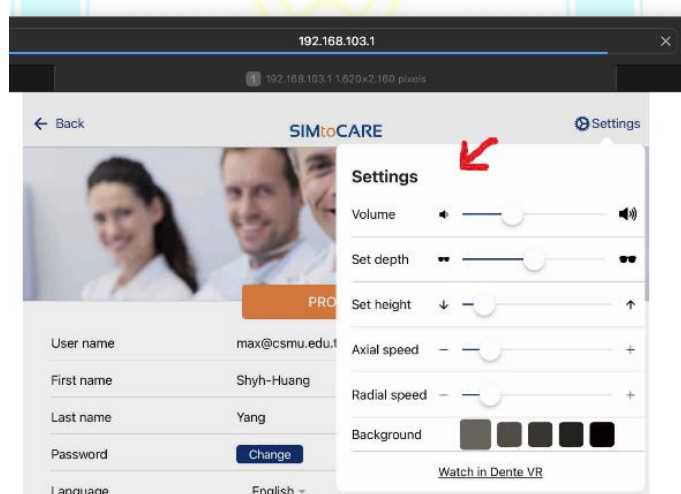

3. 輕壓 simulator 開關即可關機

