

SIMtoCARE 牙科訓練儀  
簡易故障排除與廠商資訊

1. 精密數位設備，禁止自行拆卸、維修
2. 如遇設備異常，請登出後關機
3. 關閉機台電源(機體後側下方)
4. 靜待 20 秒鐘再行啟動電源
5. 測試設備是否正常運作
6. 若異常依舊，請與原廠聯絡
7. 原廠資訊

設備名稱	廠商名稱	聯絡人	連絡電話
SIMtoCARE	荷蘭原廠	Lionel Lee	